

# Vai vēlies vairāk smaidošu pacientu?

Efektīva un droša zobu balināšana kabinetā.

Nav nepieciešama gaismošana.

Nav vajadzīgas dārgas palīgierīces.

## Izvēlies - Opalescence Boost 40% HP

Vienmēr sveigs materiāls  
katrai aplikācijai

Ideāli piemērots viena zoba  
vai zobu rindas balināšanai



Ērti un droši lietot  
kopā ar smaganu  
aizsargbarjeru OpalDam

Perfektam rezultātam  
ražotājs iesaka  
balinātāju aplicēt  
2 reizes pa 20 minūtēm



Patentēta PF formula  
stiprina zoba emalju,  
mazina jutīgumu,  
novērš kariesa veidošanos.  
Satur fluoru un kālija nitrātu

Efektīvs 40% ūdeņraža peroksīda  
gēls ar **neitrālu pH līmeni**  
maksimālai efektivitātei un drošībai



1  
Aktivizēt balinātāja gēlu,  
to samiksējot ar iekškiem,  
veicot reversa kustību  
vismaz 25 reizes.



2  
Nobeigumā gēlu iespiest  
sarkanajā šjircē. Uzlikt  
uzgali Micro 20ga FX.  
Pārbaudīt materiāla  
konsistenci uz  
maisāmā bločiņa.



3  
Uzlikt mutes pletēju.  
Noskalot un nožāvēt  
zobus.



4  
Uzklājiet OpalDam  
smaganu aizsargu 1.5-2  
mm biezumā un 4-6mm  
augstumā.



5  
Gaismojiet 20 sekundes,  
Pārbaudiet ar instrumentu,  
vai smaganu aizsargs ir  
sacietējis.



6  
Aplicējiet uz zobu  
vestibulārās puses  
Opalescence Boost  
balināšanas gēlu 0,5-1 mm  
biezumā. Noturēt uz  
zobiem 20 minūtes.



7  
Ar vakuuma atsūcēju noņemt  
balināšanas gēlu. Bez ūdens!  
6. un 7. punktu var atkārtot  
vienu līdz divas reizes.  
Neaplicēt vairāk par 3 reizēm  
vienas vizītes laikā.



8  
Kad balināšanas procedūra  
pabeigta un redzamā  
sarkanā balināšanas gēla  
kārtā ir noņemta, rūpīgi  
noskalot zobus ar ūdeni.



9  
Uzmanīgi ar instrumentu  
noņemt smaganu  
aizsargbarjeru.



10  
Salīdzināt iegūto rezultātu  
ar krāsu skalu. Ja pacients  
vēlas un ir nepieciešamība  
atkārtot balināšanas  
seansu, nākamo vizīti  
nozīmēt pēc trim līdz  
piecām dienām.  
Vai arī pacientam var  
pieņemt turpināt balināt  
mājas apstākļos ar  
Opalescence Go! 6%

Pirms



Pēc